

BANDAGEM CINESIO K-PRO 6.0

@kpro_saude

K-PRO

Descrição

A Bandagem Cinesio K-Pro 6.0 é uma bandagem adesiva de tecido que proporciona apoio externo para manter os músculos, ligamentos e tendões estáveis durante o período de recuperação de lesões. K-Pro 6.0 levanta as camadas superiores da pele criando mais espaço entre a pele e os músculos subjacentes. Acredita-se que esse espaço reduza a pressão sobre os canais linfáticos e crie mais espaço para a circulação, fluxo e melhora a drenagem linfática através da área protegida. Isso pode ajudar a diminuir o inchaço e a dor nas áreas lesadas. Também ajuda a

melhorar a circulação do fluxo sanguíneo, o que auxilia na reparação de tecidos danificados e acelera a degradação e remoção de resíduos quando os músculos estão cansados. Alivia a dor física e neurológica, a ação de levantamento da fita ajuda a aliviar a pressão sobre os receptores de dor localizados sob a pele. As propriedades elásticas exclusivas de K-Pro 6.0 garantem que os músculos e as articulações sejam apoiados de perto durante todas as atividades e desencorajam movimentos prejudiciais, permitindo ainda uma amplitude de movimento segura e saudável.

MODELOS	TAMANHOS	CORES
LM0005	5 x 600 cm	PRETO
LM0006	5 x 600 cm	AZUL
LM0007	5 x 600 cm	BEGE
LM0008	5 x 600 cm	ROSA

Composição

96% Algodão, 4% Elastano. Filme Protetor: polietileno de baixa densidade. Não Contém Látex.

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA: cartonada constituída por papel-cartão

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão.

Contra-indicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.

a. PRECAUÇÕES: Não deve ser usado sobre a pele machucada.

b. RESTRIÇÕES: Não se aplica.

c. ADVERTÊNCIAS: Produto não estéril. Suspender o uso em caso de reação alérgica.

d. CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS: Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada.

e. ARMAZENAMENTO: O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

f. TRANSPORTE: O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Indicações

K-Pro 6.0 é usado para muitas lesões comuns: relaxamento muscular; dores nas costas/de esforço; lesões nas virilhas; cordão de perna; dor no joelho; lesão no punho do rotador; chicote; cotovelo de tenista; rastreamento de patela; edema pré e pós-cirúrgico; torção no tornozelo; tendão de Aquiles; talas de canela; síndrome do túnel do carpo e também como método de prevenção de lesões atléticas e como método de apoio. Tem função de melhorar o alinhamento articular e a função da articulação, atuando em grupos de músculos opostos proporcionando mobilidade articular.

Instruções de utilização

1. Certifique-se de que a pele está limpa e seca, sem loções / óleos.
2. Se estiver aplicando fita adesiva em uma junta, certifique-se de que a junta esteja em uma posição totalmente dobrada. Se a fita for aplicada sobre um joelho ou cotovelo em uma posição estendida, a fita irá se soltar quando a articulação se mover.
3. Nunca estique a primeira ou a última fita em nenhuma das pontas.

A fita nas pontas deve ser aplicada diretamente na pele sem esticar; caso contrário, ele irá subir e não irá colar.

4. Certifique-se de definir o adesivo esfregando firmemente a fita e certifique-se de que todas as bordas estejam voltadas para baixo. Para obter melhores resultados, aplique a fita 30 minutos antes da atividade atlética.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor. Armazenar a temperatura ambiente. Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 05 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307460002

Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Pharmaplant S.A.E | Amria, Free
Zone 23512, Alexandria, Egito

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Bijante
CRF/SP 40837

@lismedimportadora

SAÚDE IMPORTA
lismed+
www.lismed.com.br