

BANDAGEM ELÁSTICA AUTOADERENTE K-PRO

@kpro_saude

K-PRO

Descrição

A Bandagem Elástica Autoaderente K-Pro é uma faixa elástica, porosa, não irritante, com bordas que impedem marcas na pele, com a função de manter a compressão uniforme não permitindo o seu deslizamento, adere sobre si mesma sem o auxílio de cliques ou fitas adesivas, não adere a pele. Dispensa tesoura para recorte, podendo ser rasgada com a mão. Mantém o grau de compressão escolhido no momento da aplicação sem auxílio de dispositivo para fixação. Acompanha contornos do corpo, permitindo a respiração da pele e o conforto do paciente.

Instruções de utilização

1. Desenrole 30 cm da bandagem antes de começar a aplicar.
2. Sem esticar aplique uma camada da bandagem até a primeira sobreposição
3. Pressione levemente a área de sobreposição para melhor fixação.
4. Mantenha o local de aplicação bem apoiado.
5. Continue aplicando a bandagem usando pressão suficiente para manter a compressão desejada.
6. Corte o excesso de bandagem e pressione a extremidade para aderir sobre si mesma.

Composição

95% não tecido, 5% spandex.
Não Contém Látex.

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco plástico.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa cartonada constituída por papel-cartão.

Indicações

Indicada para a fixação de curativos primários, como bandagem de apoios para lesões que necessitam de uma maior compressão como distensões, torções, fraturas específicas, veias varicosas, úlceras, lesões esportivas e outros.

MODELOS	TAMANHOS	CORES	MODELOS	TAMANHOS	CORES	MODELOS	TAMANHOS	CORES
LM0015	5cm x 4,5m	BEGE	LM0022	15cm x 4,5m	PRETO	LM0029	10cm x 4,5m	AZUL
LM0016	7,5cm x 4,5m	BEGE	LM0023	5cm x 4,5m	VERDE	LM0030	15cm x 4,5m	AZUL
LM0017	10cm x 4,5m	BEGE	LM0024	7,5cm x 4,5m	VERDE	LM0031	5cm x 4,5m	VERMELHO
LM0018	15cm x 4,5m	BEGE	LM0025	10cm x 4,5m	VERDE	LM0032	7,5cm x 4,5m	VERMELHO
LM0019	5cm x 4,5m	PRETO	LM0026	15cm x 4,5m	VERDE	LM0033	10cm x 4,5m	VERMELHO
LM0020	7,5cm x 4,5m	PRETO	LM0027	5cm x 4,5m	AZUL	LM0034	15cm x 4,5m	VERMELHO
LM0021	10cm x 4,5m	PRETO	LM0028	7,5cm x 4,5m	AZUL			

Contra-indicação

Pacientes com afecções arteriais.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.

- a. PRECAUÇÕES:** Não deve ser utilizado sobre a pele já machucada.
- b. RESTRIÇÕES:** Não se aplica.
- c. ADVERTÊNCIAS:** Produto não estéril. Suspenda o uso em caso de reação alérgica.
- d. CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS:** Não utilizar se a

embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Não aplicar tensão excessiva durante o enfaixamento para não causar danos à circulação. As Ataduras Elásticas Autoaderentes nunca devem provocar dor, formigamento, agulhadas, descoloração dos dedos. Se algum destes sintomas ocorrer, retirá-la imediatamente.

- e. ARMAZENAMENTO:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.
- f. TRANSPORTE:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor. Armazenar a temperatura ambiente. Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307460019

Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Suzhou Sunmed Co, Ltd | Suzhou,
Jiangsu – China.

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Bijante
CRF/SP 40837

@lismedimportadora

SAÚDE IMPORTA
lismed+
www.lismed.com.br