

BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILEOSTOMIA SKINUPPER



Descrição

Bolsa para Colostomia/Ileostomia aberta, drenável, 1 peça, recortável, com filtro, recortável 19-64mm

Composição

Filme plástico com 3 camadas (EVA/EVOH/EVA), resina sintética de carboximetilcelulose de sódio (CMC), gelatina, pectina e poliisobutileno, possui tela protetora da pele, adesivo microporoso e filtro de carvão ativado.

MODELOS

LM0068

Aberta / Drenável

LM0072

Aberta / Drenável

TIPO

COR

Bege (Opaca)

Transparente

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

caixa cartonada constituída por papel cartão.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

caixa cartonada constituída por papel cartão

Indicações

Indicada para a coleta de fezes no tratamento de pacientes colostomizados e ileostomizados.

Contra-indicação

Não é indicada para pacientes com sensibilidade conhecida aos adesivos ou componentes da bolsa ou pacientes que possuam estoma retraído ou prolapso. O uso de hidratantes e emolientes prejudica a aderência do produto.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- PRECAUÇÕES:** Manter longe do alcance de crianças
- RESTRIÇÕES:** Não se aplica.
- ADVERTÊNCIAS:** Produto não estéril. Suspender o uso em caso de reação alérgica.
- CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS:** Não utilizar o

produto fora do prazo de validade; o número de lote e prazo de validade constam na embalagem e em cada produto.

- ARMAZENAMENTO:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.
- TRANSPORTE:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instruções de utilização

BOLSA

- Medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha o produto.
- Antes de recortar a bolsa, separar as paredes frontal e traseiras da bolsa a fim de evitar o corte da parede frontal.
- Recortar o orifício inicial ligeiramente maior que o diâmetro do estoma, usando a guia de medidas impresso no papel que cobre a área da resina hidrocolóide.
- Remover o papel protetor da resina, mantendo o papel protetor do adesivo microporoso localizado ao redor da resina hidrocolóide.
- Pressionar o suporte adesivo contra

a pele de maneira cuidadosa, a fim de evitar lesões à área peristomal, assegurando-se que o adesivo fique liso e sem rugas.

- Retirar o papel protetor do adesivo microporoso e alisá-lo sobre a pele visando uma melhor fixação à pele.
- A bolsa pode permanecer à pele enquanto a mesma estiver confortável e segura.

CLAMP DE FECHAMENTO

- Dobrar a parte inferior da bolsa até o tecido protetor.
- Abrir o dispositivo e encaixar a parte dobrada da bolsa na parte interna do dispositivo.

- Fechar a trava de segurança do dispositivo, até ouvir um estalo indicando o fechamento seguro das lâminas e fechar a segunda trava.
- Para abrir, inicial pela segunda trava de segurança do dispositivo.
- Abrir a primeira trava, segurar a dobra da bolsa para realizar a drenagem e descarte do conteúdo da bolsa de maneira segura e higiênica.

Prazo de validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307469003



Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Ningbo Greetmed Medical Instruments
Co. Ltd | Ningbo Zhejiang 315042 - China

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Bijante
CRF/SP 40837

@lismedimportadora
SAÚDE IMPORTA
lismed+
www.lismed.com.br