

# CURATIVO PU ESTÉRIL COM ALMOFADA ABSORVENTE

@skinupper  
SKINUPPER®

## Descrição

Curativo estéril transparente feito de uma película de poliuretano à prova de bactérias e impermeável a água, com adesivo hipoalergênico acrílico livre de látex, que promove mínimo trauma na remoção. Sua camada de contato é uma almofada altamente absorvente e não aderente. Possui alta taxa de transmissão de vapores úmidos, reduzindo o risco de maceração. Confortável e não restritivo para o paciente, pode ser usado durante o banho.

## Composição

Poliuretano  
Almofada de Viscose Absorvente

## Apresentação comercial

### EMBALAGEM PRIMÁRIA:

papel grau cirúrgico

### EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

papel cartão

MODELOS	TAMANHOS	CORES
LM0038	5cm x 7,2cm	-
LM0039	8cm x 10cm	-
LM0040	8cm x 15cm	-

## Indicações

Indicado para cobrir incisões pós-operatórias, cortes menores, escoriações, lacerações da pele ou onde seja necessário um curativo à prova de água, que ajude a prevenir contaminação bacteriana.

## Contra-indicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE


- PRECAUÇÕES:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Se houver desenvolvimento de infecção durante o uso do curativo, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável.
- RESTRIÇÕES:** Não se aplica.
- ADVERTÊNCIAS:** Produto não estéril. Suspenda o uso em caso de reação alérgica. Não deve ser reutilizado.
- CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Quando

utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.

- ARMAZENAMENTO:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.
- TRANSPORTE:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

## Instruções de utilização

- Limpar o local conforme protocolo da instituição.
- Abrir a embalagem de forma asséptica.
- Retirar o papel protetor 1.
- Aplicar o filme no local desejado, e retirando o papel protetor 2 até completa fixação.
- Retire o papel protetor 3 e pressione as bordas para melhor fixação do curativo.

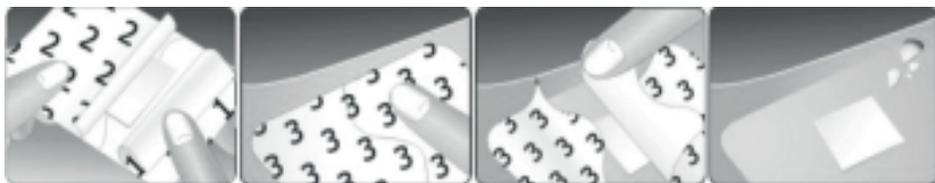

## Registro ANVISA

82307460014

## Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda  
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio  
São Paulo / SP | CEP: 04713-002  
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br  
CNPJ: 40.678.514/0001-15

## Fabricante

Pharmaplast S.A.E. | Amria Free Zone,  
Alexandria Egito.

## Resp. Técnico

Tatiane Cristina Bijante  
CRF/SP 40837

## Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.

Armazenar a temperatura ambiente.

Evite qualquer choque térmico.

## Prazo de validade

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

@lismedimportadora  
SAÚDE IMPORTA  
**lismed+**  
www.lismed.com.br