

FITA DE SILICONE SKINUPPER



Descrição

Fita hospitalar não estéril feita de silicone adesivo. Tem uma adesividade inteligente e de alta tecnologia, sendo indicada para pacientes com pele sensível. Permite a fixação e a retirada da pele sem perda de tecido e de forma branda. Mesmo nas peles mais finas e sensíveis, a Fita de Silicone SkinUpper garante um cuidado suave na aplicação e na retirada. É indicada para: prematuros, recém-nascidos, pacientes oncológicos e todos com pele sensível.

Composição

100% Silicone. Não Contém Látex.

MODELOS	TAMANHOS	CORES
LMOO36	2,5cm x 1,5m	BEGE
LMOO37	2,5cm x 1,5m	TRANSPARENTE

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA: carretel plástico com tampa acrílica.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa cartonada constituída por papel-cartão.

Indicações

Indicada para o tratamento e prevenção de cicatrizes e queloides, proporcionando a redução do tamanho, a hipertrofia e a coloração de cicatrizes de até 30 anos de existência através da aceleração do processo da troca celular, rejuvenescendo a pele.

Contra-indicação

Pacientes com hiper sensibilidade cutânea.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- PRECAUÇÕES:** Não deve ser utilizado sobre a ferida aberta e/ou sobre a pele suturada.
- RESTRIÇÕES:** Não se aplica.
- ADVERTÊNCIAS:** Produto não estéril. Suspender o uso em caso de reação alérgica.

d. CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS: Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada.

e. ARMAZENAMENTO: O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.

f. TRANSPORTE: O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instruções de utilização

- Recorte a fita cerca de 3mm maior do que a cicatriz e aplique. Cada placa pode ser utilizada por até 07 dias. Devendo o tratamento ser feito por, pelo menos, 03 meses seguidos.
- O tratamento completo deve ocorrer em ciclos de 03 meses.
- Não precisa ser retirada durante o banho, mas pode-se remover o produto e recolocar novamente. Não há necessidade de ser higienizado a fita, apenas a pele. Na aplicação ou reaplicação, certifique-se que pele esteja sempre limpa. Sem hidratantes, cremes, sabão e etc.

- Utilize o produto por, pelo menos, 12 horas diárias. A indicação para uma melhor performance é de utilização de 24 horas diárias, sendo a mesma placa utilizada por até 07 dias.



Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor. Armazenar a temperatura ambiente. Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307460012

Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd | Huzhou, Zhejiang – China.

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Bijante
CRF/SP 40837

@lismedimportadora
SAÚDE IMPORTA
lismed+
www.lismed.com.br