

# SISTEMA PARA SUTURA E CURATIVO SKINSTRIP



## Descrição

Curativo estéril microporoso, flexível, para cicatrização da pele, feito de não tecido em poliéster, com revestimento não elástico e adesivo hipoalergênico, sensível à pressão. Rápido e fácil de aplicar, pode ser usado em áreas do corpo contornadas ou onde ocorrem flexões e movimentos.

## Composição

Poliéster  
Adesivo hipoalergênico

MODELOS	TAMANHOS	QTD. TIRAS
LM0055	0,64cm x 7,6cm	12
LM0106	0,40cm x 3,8cm	16
LM0107	0,40cm x 7,6cm	16
LM0108	0,64cm x 10,2cm	10
LM0109	1,30cm x 10,2cm	12
LM0110	2,60cm x 10,2cm	12

## Apresentação comercial

**EMBALAGEM PRIMÁRIA:**  
papel grau cirúrgico

**EMBALAGEM SECUNDÁRIA:**  
papel-cartão

## Indicações

Indicados para fechamento de lesões cutâneas, no tratamento de lacerações e incisões cirúrgicas. Pode ser usado em combinação com suturas, grampos ou após a remoção deles, para suporte de feridas.

## Contra-indicação

Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida para o produto ou qualquer um de seus componentes, em feridas infectadas ou em caso de feridas de alta tensão que não possam ser facilmente aproximadas com os dedos ou fórceps. Pode ocorrer tosquia, bolhas de pele ou perda de aderência se for aplicada tensão excessiva.

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

**a. PRECAUÇÕES:** Certifique-se de que a pele está limpa, seca e livre de óleos de pele para garantir uma boa aderência. A ocorrência de edema pós-operatório pode causar tosquia da pele, bolhas na pele ou perda de aderência da fita adesiva em ambas as extremidades da tira. Após a remoção da tira, pode ocorrer descamação da pele como resultado do uso de qualquer fita cirúrgica ou adesivo. Raramente, pode ocorrer hipopigmentação ou hiperpigmentação devido à aplicação de adesivos na pele. Acne leve e foliculite têm sido observadas ocasionalmente em testes com voluntários saudáveis

**b. RESTRIÇÕES:** Não se aplica.

**c. ADVERTÊNCIAS:** Produto estéril, de uso único. Proibido reprocessamento. Suspender o uso em caso de reação alérgica. Não deve ser reutilizado.

**d. CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada.





**e. ARMAZENAMENTO:** O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.

**f. TRANSPORTE:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

## Instruções de utilização

Limpar o local conforme protocolo da instituição. Abra o pacote de forma asséptica. Remova a parte final do papel de proteção. Cuidadosamente alinhe as bordas da ferida. Começando no meio da ferida, coloque metade da tira num dos lados da ferida, traga suavemente o outro lado da ferida em direção a ela e depois passe a tira por cima. Colocar

as tiras alternadamente acima e abaixo da primeira tira - isto ajuda a alinhar as bordas e mantém a tensão da pele igual. Continue este processo até ter fechado completamente a ferida. Para fixação adicional, para reduzir a tensão e ancorar as filar de tiras no lugar, coloque duas tiras na vertical ao longo das filar - uma de cada lado da ferida

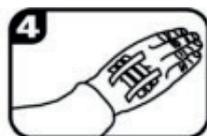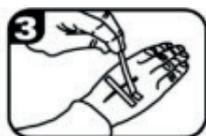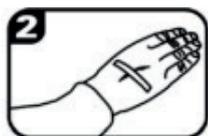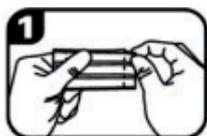

## Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.  
Armazenar a temperatura ambiente.  
Evite qualquer choque térmico.

## Prazo de validade

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

## Registro ANVISA

82307469004

## Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda  
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 - Chácara Santo Antonio  
São Paulo / SP | CEP: 04713-002  
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br  
CNPJ: 40.678.514/0001-15

## Fabricante

Pharmaplast S.A.E. | Amria Free Zone, Alexandria Egito.

## Resp. Técnico

Tatiane Cristina Bijante  
CRF/SP 40837

@lismedimportadora  
SAÚDE IMPORTA  
**lismed+**  
www.lismed.com.br