


CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO

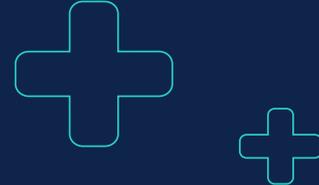

@skinupper

SKINUPPE R®

Descrição

Filme adesivo transparente em rolo, à prova d'água, não estéril, revestido com adesivo acrílico hipodérmico. De fácil aplicação, é altamente flexível, conformável e pode ser recortado no tamanho desejado. Sua alta taxa de transmissão de vapores úmidos, 700g/m²/24hrs, evita o acúmulo de transpiração e fluidos sob o filme, é impermeável a líquidos e previne a contaminação bacteriana.

Composição

Poliuretano

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA: cartonada constituída por papel-cartão.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão.

MODELOS	TAMANHOS	CORES
LMOOO2	10cm x 10m	TRANSPARENTE
LMOOO4	15cm x 10m	TRANSPARENTE

Indicações

Filme para retenção de curativos pós-operatórios, gazes e curativos absorventes, para proteger cateteres, tubos ou drenos. Proteção para regiões de pressão e cisalhamento.

Contra-indicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.

- a. PRECAUÇÕES:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Se houver desenvolvimento de infecção durante o uso do curativo, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável.
- b. RESTRIÇÕES:** Não se aplica.
- c. ADVERTÊNCIAS:** Produto não estéril. Suspenda o uso em caso de reação alérgica. Pode ser recortado no tamanho desejado. Não deve ser reutilizado.
- d. CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve



ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.

e. ARMAZENAMENTO: O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.

f. TRANSPORTE: O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instruções de utilização

Limpar e secar a pele. Cortar o Filme Rolo SkinUpper no tamanho desejado. Remover a película branca, do centro para as extremidades e, aplicar o filme sobre a pele exercendo delicada pressão sobre o mesmo, para garantir perfeita adesividade. Remover o filme de suporte.

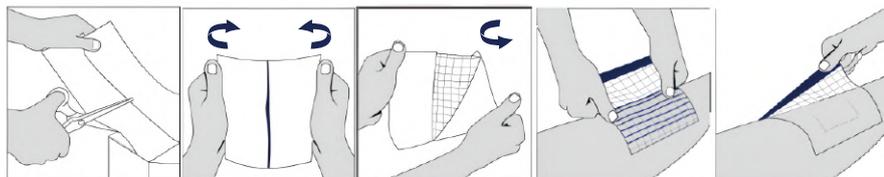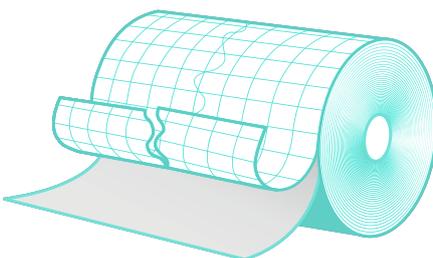

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.
Armazenar a temperatura ambiente.
Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307460020

Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co. Ltd
No 98 Chuang Yuan Road - Ningbo - Zhejiang
315042 - China

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Bijante
CRF/SP 40837

@lismedimportadora

SAÚDE IMPORTA
lismed+
www.lismed.com.br