

CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL

@skinupper
SKINUPPER®

Descrição

Curativo estéril transparente feito de uma película de poliuretano à prova de bactérias e impermeável a água, com adesivo hipoalergênico acrílico livre de látex, que promove mínimo trauma na remoção. Possui alta taxa de transmissão

de vapores úmidos, reduzindo o risco de maceração. Confortável e não restritivo para o paciente, pode ser usado durante o banho.

Composição

Poliuretano

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA:
Papel Grau Cirurgico

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
Papel Cartão

MODELOS	TAMANHOS	CORES
LMO109	6 x 7 cm	TRANSPARENTE
LMO110	10 x 12 cm	TRANSPARENTE

Indicações

Indicado para uso para fixação de cateteres.

Contra-indicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.



- a. PRECAUÇÕES:** O produto não é indicado para aplicação em cavidades internas do organismo. Caso ocorra infecção durante o uso do curativo, esta deve ser acompanhada e tratada conforme o protocolo clínico vigente. Suspender o uso no caso de surgimento de irritações da pele. Este produto é de uso único – sua reutilização pode causar risco de infecção cruzada e comprometer a eficácia do curativo.
- b. RESTRIÇÕES:** Não se aplica.
- c. ADVERTÊNCIAS:** Produto Estéril – Uso Único – Descartar após o Uso.
- d. CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS:** Não utilizar se a embalagem

estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.

- e. ARMAZENAMENTO:** O produto deve ser mantido em local seco, umidade relativa abaixo de 75%, fresco e ao abrigo da luz, temperatura de armazenamento de 0°C a 40°C e ao abrigo da luz.
- f. TRANSPORTE:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, seguindo as condições de temperatura e de armazenamento.

Instruções de utilização

1. Limpar o local conforme protocolo da instituição.
2. Abrir a embalagem de forma asséptica.
3. Retire a película inferior e faça a aplicação no local desejado, certifique-se que o curativo não esteja esticado durante a aplicação.
4. Faça a remoção da última película protetora presente na face superior do curativo.
5. Faça leve pressão seguindo a direção do centro às bordas do curativo a fim de garantir a total fixação do curativo.

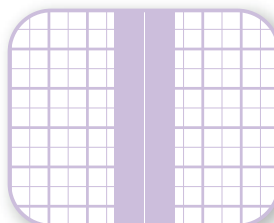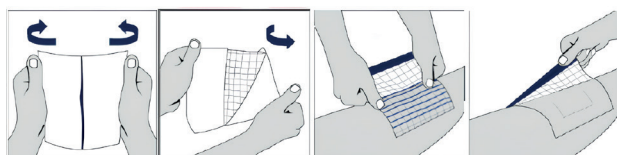

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.

Evite qualquer choque térmico.

Armazenar em local seco, umidade relativa < 75% e a temperatura entre 0°C a 40°C.

Prazo de validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307460021

Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co. Ltd
No 98 Chuang Yuan Road - Ningbo - Zhejiang
315042 - China

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Biajante
CRF/SP 40837

@lismedimportadora
SAÚDE IMPORTA
lismed+
www.lismed.com.br