

CURATIVO NÃO TECIDO EM ROLO UPPERFIX

@skinupper
SKINUPPER®

Descrição

Curativo não tecido em rolo flexível e respirável feito de tecido não tecido com adesivo médico feito de poliacrilato, livre de látex.

Composição

Tecido Não Tecido Elástico, Papel Siliconado e adesivo poliacrílico.

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA:
Cartonada constituída por papel-cartão

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
Caixa de papelão.

MODELOS	TAMANHOS	CORES
LMO114	2,5cm x 10 m	TRANSPARENTE
LMO115	5cm x 10 m	TRANSPARENTE
LMO116	10cm x 10 m	TRANSPARENTE

Indicações

Indicado para fixação de curativos, drenos e catéteres.

Contra-indicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.

a. PRECAUÇÕES: O produto não é indicado para aplicação em cavidades internas do organismo. Caso ocorra infecção durante o uso do curativo, esta deve ser acompanhada e tratada conforme o protocolo clínico vigente. Este produto é de uso único – sua reutilização pode causar risco de infecção cruzada e comprometer a eficácia do curativo.

b. RESTRIÇÕES: Não se aplica.

c. ADVERTÊNCIAS: Produto Não Estéril – Uso Único - Descartar após o Uso.

d. CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS: Não utilizar se a embalagem

estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.

e. ARMAZENAMENTO: O produto deve ser mantido em local seco, umidade relativa abaixo de 75%, fresco e ao abrigo da luz, temperatura de armazenamento de 0°C a 40°C e ao abrigo da luz.

f. TRANSPORTE: O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, seguindo as condições de temperatura e de armazenamento.

Instruções de utilização

1. Limpar o local conforme protocolo da instituição.
2. Abrir a embalagem de forma asséptica.
3. Faça a aplicação do curativo, cateter ou dreno que deverá ser coberto pelo produto.
4. Selecione o tamanho apropriado para a completa cobertura da área de aplicação, desenrole a quantidade necessária e com o auxílio de uma tesoura corte-o.
5. Retire a película superior e faça a aplicação no local desejado, certifique-se que o curativo não esteja esticado durante a aplicação.

6. Faça leve pressão seguindo a direção do centro às bordas do curativo a fim de garantir a total fixação do mesmo.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor.

Evite qualquer choque térmico.



Armazenar em local seco, umidade relativa < 75% e a temperatura entre 0°C a 40°C.

Prazo de validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307460022

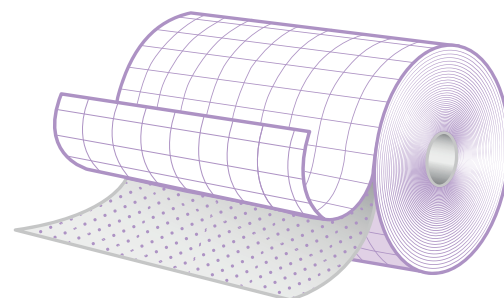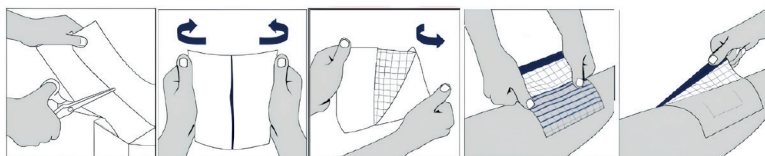

Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co. Ltd
No 98 Chuang Yuan Road - Ningbo - Zhejiang
315042 - China

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Biajante
CRF/SP 40837

@lismedimportadora
SAÚDE IMPORTA
lismed+
www.lismed.com.br